

Table des matières

Index

Rechercher

retic

Lancer

Pertinence Titre

- 100. Paramétrages du laser
- 78. Caractéristiques des performances
- 28. 3 - Paramétrage de l'analyseur
- 21. Descriptif & technologie de l'appareil
- 14. Informations relatives à la version V2.2.5
- 14. Nettoyage des cuves à flux continu
ERB/RETIC & LMNE
- 14. Spécifications physiques
- 7. Interprétation des alarmes
- 7. Menu Machine de l'analyseur
- 7. Nettoyage général de l'analyseur

Paramètres CBC/DIFF
Paramètres relatifs aux réticulocytes
Paramètres d'érythroblastes

Paramètres CBC/DIFF

Trois spécimens recueillis sur EDTA ont été prélevés lors de l'activité de routine d'un laboratoire et stockés entre 4 et 8 °C. La stabilité des échantillons a été évaluée sur une période de 72 heures.

Les résultats concluent à une exigence de stabilité relative de l'échantillon de 48 heures pour le CBC et de 24 heures pour le DIF.

Paramètres relatifs aux réticulocytes

Des échantillons ont été prélevés durant l'activité de routine d'un laboratoire. Les échantillons ont été stockés entre 4 et 8 °centigrade. La stabilité des échantillons a été évaluée sur une période de 72 heures.

Les résultats concluent à une exigence de stabilité relative de l'échantillon de 48 heures pour les paramètres relatifs aux réticulocytes.

Paramètres d'érythroblastes

Conformément aux directives ICSH (Clin. Lab. Haemat. 1994, 16, 157-174), 3 échantillons contenant des érythroblastes mesurables ont été prélevés durant l'activité de routine d'un laboratoire. Les échantillons ont été stockés à 4 degrés centigrade. La stabilité des échantillons a été évaluée sur une période de 48 heures avec une analyse discontinue, en double, des deux fractions aliquotes des échantillons.

Les résultats concluent à une exigence de stabilité relative de l'échantillon de 24 heures pour les paramètres d'érythroblastes.

HORIBA ABX SAS

HORIBA
Medical