



OXABIO
13 rue d'Alger
59400 CAMBRAI

Protocole de prélèvement de Chlamydia et Gonorrhoeae

Ref : 03-A-PRE-7I_042 / 01

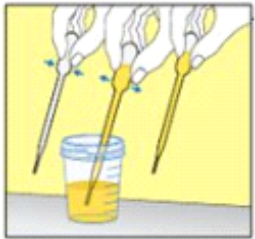
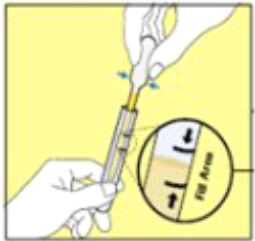
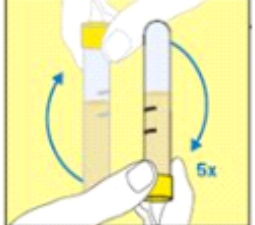
Version : 01

Applicable le : 26-04-2017



Protocole de prélèvement de Chlamydia et Gonorrhoeae

Collecte d'échantillons urinaires avec le kit PCR Cobas®

	1/ PIPETER : <u>Transférer</u> immédiatement l'urine dans le tube de milieu pour PCR Cobas® en utilisant la pipette jetable. ✓ Ne pas avoir uriné depuis au moins 1 heure ✓ Pas de toilette locale ou vaginale ✓ Fournir le premier jet d'urine (10 à 15 ml) dans un flacon de collecte	<u>Stockage et transport :</u> <u>Hors</u> milieu de transport : ✓ 24 h ✓ Entre +2 et +30 °C <u>Dans</u> milieu de transport ✓ 12 mois ✓ Entre +2 et +30 °C <u>Refus de l'échantillon :</u> ➤ Volume de remplissage inadéquat (entre les deux lignes noires) ➤ Présence de sang	
	2/ TRANSFERER : Le volume correct d'urine a été ajouté lorsque le niveau de liquide se situe entre les <u>deux lignes noires</u>.		
	3/ FERMER : Refermer le tube du milieu PCR Cobas® en serrant bien le bouchon.		
	4/ MELANGER : Retourner le tube 5 fois pour mélanger. 5/ IDENTIFIER et DATER: Indiquer le nom, nom de jeune fille, prénom, date de naissance, date et heure de prélèvement.		



OXABIO
13 rue d'Alger
59400 CAMBRAI

Protocole de prélèvement de Chlamydia et Gonorrhoeae

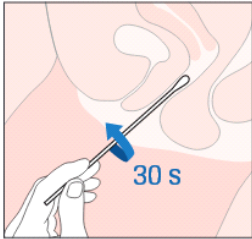
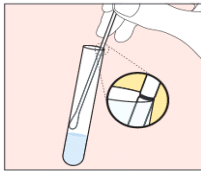
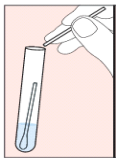
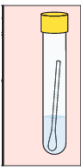
Ref : 03-A-PRE-7I_042 / 01

Version : 01

Applicable le : 26-04-2017



Prélèvement VAGINAL sur écouvillon Cobas® PCR

	1/ PRELEVEZ : - Utilisez un seul écouvillon et jeter le second ; - Insérez l'écouvillon à une profondeur de 5 cm dans l'ouverture vaginale ; - Faites tourner doucement l'écouvillon pendant environ 30 sec tout en le frottant contre les parois vaginales ; - Retirez soigneusement l'écouvillon ; - Veillez à ce que l'écouvillon n'entre en contact avec aucune surface.	<u>Stockage et transport :</u> <u>Hors</u> milieu de transport : ➤ 24 h ➤ Entre +2 et +30 °C <u>Dans</u> milieu de transport ➤ 12 mois ➤ Entre +2 et +30 °C
	2/ POSITIONNEZ : - Retirez le bouchon du tube de milieu PCR Cobas® ; - Placez l'écouvillon dans le tube jusqu'à ce que la ligne noire visible sur la tige de l'écouvillon soit alignée avec le bord du tube.	<u>Refus de l'échantillon :</u> ➤ Présence de sang ➤ Présence de 2 écouvillons dans le tube
	3/ BRISEZ : - Inclinez avec précaution l'écouvillon contre le bord du tube afin de briser la tige de l'écouvillon au niveau de la ligne noire ; - Jetez la partie supérieure de l'écouvillon.	
	4/ FERMEZ : - Refermez le tube de milieu PCR Cobas® en serrant bien le bouchon. 5/ IDENTIFIER et DATER : - Indiquer le nom, nom de jeune fille, prénom, date de naissance, date et heure de prélèvement.	



OXABIO
13 rue d'Alger
59400 CAMBRAI

Protocole de prélèvement de Chlamydia et Gonorrhoeae

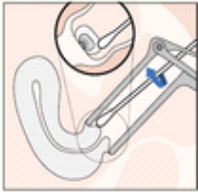
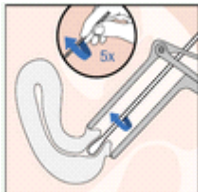
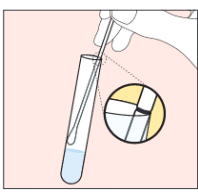
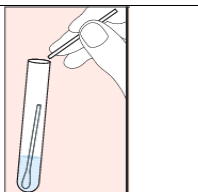
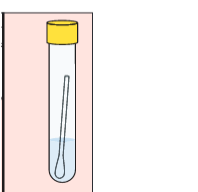
Ref : 03-A-PRE-7I_042 / 01

Version : 01

Applicable le : 26-04-2017



Ecouvillonnage ENDOCERVICAL avec le kit PCR Cobas®

	1/ NETTOYER : - Enlever tout excès de mucus de l'orifice cervical et de la muqueuse avoisinante ; - Utiliser plus d'un écouvillon si besoin puis jetez les.	Stockage et transport : <u>Hors</u> milieu de transport : ➤ 24 h ➤ Entre +2 et +30 °C <u>Dans</u> milieu de transport ➤ 12 mois ➤ Entre +2 et +30 °C <u>Refus de l'échantillon :</u> ➤ Présence de sang ➤ Présence de 2 écouvillons dans le tube
	2/ COLLECTER : Insérez un nouvel écouvillon propre dans le canal endocervical ; - Faites tourner 5 fois l'écouvillon dans un sens ; - Retirez soigneusement l'écouvillon sans toucher la muqueuse vaginale.	
	3/ POSITIONNEZ : - Retirez le bouchon du tube de milieu PCR Cobas® ; - Placez l'écouvillon dans le tube jusqu'à ce que la ligne noire visible sur la tige de l'écouvillon soit alignée avec le bord du tube.	
	4/ BRISEZ : - Inclinez avec précaution l'écouvillon contre le bord du tube afin de briser la tige de l'écouvillon au niveau de la ligne noire ; - Jetez la partie supérieure de l'écouvillon.	
	5/ FERMEZ : - Refermez le tube de milieu PCR Cobas® en serrant bien le bouchon. 6/ IDENTIFIER et DATER : - Indiquer le nom, nom de jeune fille, prénom, date de naissance, date et heure de prélèvement.	