



DELAIS PRE-ANALYTIQUES DES PRELEVEMENTS DE BACTERIOLOGIE



But

Le but de cette instruction est de définir les délais pré-analytiques des prélèvements de bactériologie.



Etendue

Concerne les prélèvements de bactériologie.



Définitions

- Délai pré-analytique (délai d'acheminement) : Délai entre le prélèvement et l'analyse
- **Température ambiante** : 15-25°C
- **Température réfrigérée** : 2-8°C
- Milieux de transport : ESWAB, FECALSWAB, TUBE BORATE, BAILENGER & MIF, milieu UMMt (mycoplasme), Milieux MTL (COVID)
- **SANS** milieux de transport : écouvillon sec, flacon stérile
- Code DEL : code de non-conformité en cas de délai dépassé



Bibliographie

¹REMIC ou ²fiche technique (version en vigueur)



Contenu

Pour la conduite à tenir en cas de délai dépassé voir le document «03-A-ACQ-5I_007-Événements indésirables FranceLIS

0H	2H	4H	6H
¹HEMOCULTURE dès que possible, acceptable jusqu'à 24H à température ambiante ¹LCR sans délai, acceptable jusqu'à 2H à température ambiante	¹ECBU SANS conservateur (tube boraté non percuté) à température ambiante ou <12H à température réfrigérée acceptable jusqu'à 24H ^{1,2}COPROCULTURE SANS milieu à température ambiante ou 48H à température réfrigérée ¹PULMONAIRE (expecto, aspiration bronchique, LBA gastrique) à température ambiante ou 24H à température réfrigérée ¹PRELEVEMENTS ORTHOPEDIQUES à température ambiante ¹PRELEVEMENTS SUR ECOUVILLONS SANS milieu de transport (plaie, escarre, bactério cutané, génitaux, oculaire, BMR ou SARM) à température ambiante ¹SPERMOCULTURE à température ambiante ¹MYCOPLASME SANS milieu à température ambiante ou 48H à température réfrigérée ^{1,2}RECHERCHE DE CLOSTRIDIUM à température ambiante ou 3J à température réfrigérée ¹ORL phlegmon à température ambiante	¹PARASITOLOGIE SANS milieu à température ambiante ¹DISPOSITIFS IMPLANTABLES (cathéter, drain, embout de sonde ou stérilet) à température ambiante ou 24H à température réfrigérée ¹MYCOLOGIE CANDIDOSE à température ambiante ou 24H à température réfrigérée ¹LIQUIDE PLEURAL, ASCITE ARTICULAIRE à température ambiante ou 24H à température réfrigérée ¹PUS PROFOND à température ambiante ou 24H à température réfrigérée	²ROTAVIRUS / ADENOVIRUS à température ambiante ou 4J à température réfrigérée ²SANG DANS LES SELLES à température ambiante ou 3J à température réfrigérée



12H	20H	24H	48H
¹ ORL phlegmon SUR MILIEU DE TRANSPORT à température ambiante	² MYCOPLASME MILIEU UMMt à température ambiante ou 56H à température réfrigérée 	¹ MYCOBACTERIE (BK) à température ambiante ou 72H à température réfrigérée ^{1,2} PRELEVEMENTS GENITAUX* (GONOCOQUE) AVEC milieu de transport (ESWAB) à température ambiante ² PARASITOLOGIE AVEC milieu de transport (BAILENGER & MIF) à température ambiante	¹ ECBU AVEC milieu de transport (tube boraté percuté) à température ambiante ² COPROCULTURE AVEC milieu de transport (fecalswab) à température ambiante ou 72H à température réfrigérée ^{1,2} PRELEVEMENTS SUR ECOUVILLONS* AVEC milieu de transport (ESWAB) (plaie, escarre, bactério cutané, génitaux, oculaire, BMR ou SARM) à température ambiante SARS COV 2 AVEC milieux de transport à température réfrigérée

Envoi à distance sans risque

¹MYCOLOGIE La longue survie à sec et à température ambiante des dermatophytes dans les squames, cheveux, poils, fragments d'ongles et de matière sous unguéale, permet un envoi à distance sans risque de détérioration.

